

SURGISPON[®]

Pó hemostático absorvível



Kit PS
(seringa pré-carregada)



SURGISPON[®]

Pó hemostático absorvível

O kit com a seringa pré-carregada de Pó Hemostático Absorvível SURGISPON é destinado ao uso hemostático, por meio da aplicação sobre a superfície hemorrágica, especialmente em um local de difícil acesso.



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Mantém a viscosidade uniforme do início ao fim, após a mistura com solução salina/trombina.
- Pronto para uso em 30 segundos, uma vez que o soro fisiológico estéril/trombina esteja uniformemente misturado.
- O produto envolve o local da hemorragia para interrompê-la mais rapidamente após a constituição (conforme indicado abaixo). Tem eficácia, segurança e eficiência comprovadas em transfusões de sangue, em grandes e pequenas complicações e no tempo de operação cirúrgica.
- Permanece no lugar durante a hemorragia ativa, mesmo após a mistura com solução salina/trombina, proporcionando uma hemostasia mais rápida onde for necessária.
- Fácil de usar e pode ser aplicado localmente no local da hemorragia.

SURGISPON[®]

Pó hemostático absorvível



Seringa vazia para misturar a solução estéril com o pó

Pó de esponja de gelatina absorvível SURGISPON

Conector Luer.

Copo de transferência de líquido.

Ponta de aplicador.

SURGISPON®

Pó hemostático absorvível

PREPARAÇÃO DA MATRIZ HEMOSTÁTICA



Etapa 1

Coloque solução salina estéril/trombina estéril no copo de transferência de líquido estéril; Transfira toda a solução estéril do copo de transferência para a seringa vazia.



Etapa 2

Conecte as seringas - Remova a tampa da seringa pré-carregada de pó SURGISPON e conecte-a à seringa contendo solução estéril, através do conector Luer.



Etapa 3

Misture o conteúdo das seringas - Comece a misturar empurrando a solução estéril para dentro da seringa pré-carregada de pó de SURGISPON. Continue trocando a solução entre as seringas até que todos os componentes estejam completamente misturados e a consistência seja uniforme.



Etapa 4

Fixe a ponta do aplicador para que o produto esteja pronto para o uso clínico.



GRUPO
AMPLUS

☎ **21 3253-2373**

☎ **21 3253-2374**

Rua Eng. Enaldo Cravo Peixoto, 105 - Salas 1003/1006
Tijuca Rio de Janeiro/RJ

🌐 | grupoamplus.med.br

📷 | [grupo.amplus](https://www.instagram.com/grupo.amplus)